

NEU

ANABOX® 7 TAGE COMPACT



CE




Jeden Tag die richtige Medizin zur richtigen Zeit.

Der Wochendosierer für Ihre Medikamente

- » sichere Aufbewahrung
- » spülmaschinenfest
- » Made in Germany

LOT



 **anmed GmbH**
 Gartenstraße 13 • D-09456 Annaberg-Buchholz
 Tel.: +49(0)3733 596300 • Fax: +49(0)3733 596301
 E-Mail: info@anmed.de
 www.anabox.de

 **ACHTUNG!** Bitte unbedingt Gebrauchsanweisung auf der Innenseite beachten!

Reinigung & Befüllung

1. Entnehmen Sie die Tagesdosierer aus dem Magazin (Bild 5*) und schieben Sie den Deckel auf (Bild 1*).
2. Entfernen Sie nun den Deckel durch eine leichte Drehbewegung (Bild 2*).
3. Jetzt können die Dosiererunterteile und Deckel gereinigt werden, beachten Sie dazu die Hinweise der Gebrauchsanweisung.
4. Lassen Sie die Einzelteile ausreichend trocknen, bevor Sie die Tagesdosierer nach dem entsprechenden Tag und den Einnahmezeiten (Bild 1*) mit Medikamenten befüllen.
5. Klicken Sie nun den Deckel in der richtigen Position auf das Unterteil (Bild 3*). Achten Sie dabei darauf, dass das Einnahmefach für „morgens“ immer das Größere ist und zur linken Seite ausgerichtet werden muss (Bild 1*).
6. Nun sitzt der Deckel sicher und lässt sich für die gewünschte Entnahme der Medikamente entsprechend verschieben.

Entnahme der Medikamente aus dem Tagesdosierer:

1. Der Einnahmetag ist seitlich auf dem Dosiererunterteil und die Einnahmezeiten auf dem Deckel des Tagesdosierers erkennbar.
2. Das größere Fach für die Medikamente am Morgen befindet sich immer links (Bild1*).
3. Für die Entnahme der Medikamente im Laufe des Tages schieben Sie den Deckel einfach nach rechts (Bild 1*), bis das jeweilige Fach frei liegt. Anschließend schieben Sie den Deckel wieder nach links in die Ausgangsposition, um den Tagesdosierer zu verschließen.
4. Um das Fach nachts auf der rechten Seite des Dosierers zu öffnen, schieben Sie den Deckel nach links (Bild 4*). Dieses schließen Sie wieder, indem Sie den Deckel nach rechts in die Ausgangsposition bewegen.

Entnahme der Tagesdosierer aus dem Magazin:

1. Sie können den Tagesdosierer einfach an der vorderen Seite des Magazins herausnehmen (Bild 5*) und durch leichten Druck auf gleichem Wege wieder zurückführen.
2. Zum Wechsel des Wochentages, schieben Sie die restlichen Tagesdosierer von hinten nach vorne. Setzen Sie danach den entleerten Tagesdosierer in die hintere Öffnung ein (Bild 6*).

* Bilder siehe Vorderseite

ANABOX®

7 TAGE COMPACT



GEBRAUCHSANWEISUNG

Medizinprodukt der Klasse I

Version 03 / 2017



Medikamentenbox für eine Woche mit einzelnen Tagesdosierern für die unterschiedlichen Einnahmezeiten!

Medikamentenbox vor Kindern sicher aufbewahren und fern halten!

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch unsere nützlichen Tipps und Hinweise!

- Vor Erstgebrauch bitte die einzelnen Tagesdosierer auswaschen/ausspülen! Empfehlung - bitte die Teile mit lauwarmem Wasser und einem milden, für die Reinigung von Geschirr in privaten Haushalten zugelassenem Reinigungs- bzw. Spülmittel säubern.
Man kann aber auch die Spülmaschine (Regeltemperatur 50°C) nutzen, da der Dosierer spülmaschinenfest ist.
- Empfohlen wird die Reinigung ebenfalls vor Neubestückung der Dosierer mit Medikamenten oder bei eintretenden Medikationsänderungen!
- Bitte bei der Einnahme auf die richtige Reihenfolge der Tage achten!
- Beachten Sie bitte auch eventuelle besondere Lagerungsbedingungen von Medikamenten wie z. B. Lichtempfindlichkeit und Temperatur laut Beipackzettel der jeweiligen Verpackung. Bei Unklarheiten fragen Sie bitte Ihren Apotheker oder die Herstellerfirma des Medikaments. Für die unkorrekte Benutzung der **ANABOX®** oder die unkorrekte Einnahme von Medikamenten übernehmen wir keinerlei Haftung!
- Die Benutzung der Medikamentenbox durch Personen mit geistigen Behinderungen sollte unter fachkundiger Aufsicht erfolgen.